


クイックガイド

視力測定



視力表の上に矢印が見えます

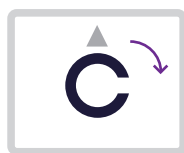

矢印の位置を切れ目に合うようにダイヤル操作



矢印と切れ目の方向が合ったら OK



視力測定 (赤緑チャート)

ぼんやり


はっきり



文字がはっきり、濃く見えるように回す





赤と緑どちらもはっきり見えたら OK

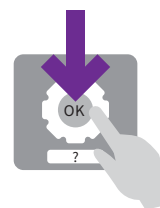

乱視テスト

点群 1

点群 2

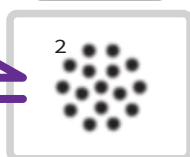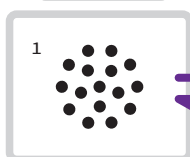

ダイヤルを回すと「点群1」が表示




ダイヤルを右に回すと「点群2」が表示

ダイヤルを左右に回し、
交互に表示される画像を比較

一方の点群が良く見えた場合

OK ボタンを押す

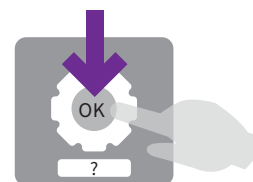

両方の点群が同じに見えた場合

ダイヤルの下の「？」ボタンを押す

